



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 2 st. Vingskruv M8
- 7 st. Vingskruv M6



Skruva fast konsollen i underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 och 4 st. låsmutter M8. **(Markering)**

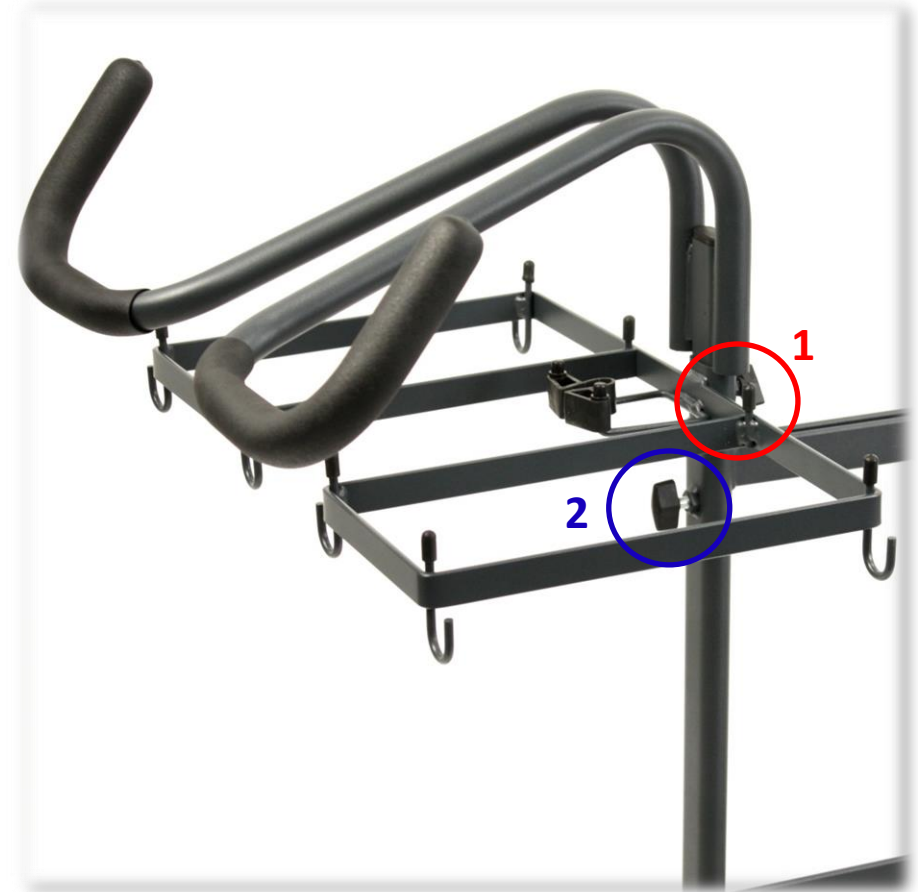

1: Trä på hållare kombi på styret och lås fast med vingskruv M6. **(Markering 1)**
2: Sätt styret på plats i konsollen och skruva fast med vingskruv M8. **(Markering 2)**



Placera säckhållaren i konsollen och skruva fast med vingskruv M8. **(Markering)**



1: Placera trådkorg stor och skruva fast med 2 st. vingskruv M6. **(Markering 1)**

2: Placera tvättpåsehållarna på vänstra sidan och skruva fast med vingskruv M6. **(Markering 2)**

Monteringsbeskrivning

P20588 Viking Metodvagn stor 52863



1: Placera moppboxhållaren bak och skruva fast med vingskruv M6. **(Markering 1)**

2: Placera stativhållaren fram och tryck fast **(Markering 2)**

3: Placera Trådkorg XL enligt bilden. **(Markering 3)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett P20588 Viking Metodvagn stor 52863