



## MAX Munskydd FFP2 utan ventil

Munskyddet är avsett att skydda den som bär masken från partiklar och smitta i sin omgivning. Skyddet har bra passform. Tänk på att inte röra vid skyddet när du tar av och på. Skydden är avsedda för engångsbruk.

Ger bra filterprestanda samtidigt som andningsmotståndet är lågt. Andningsskyddet är klassat som personlig skyddsutrustning och uppfyller kraven i europeisk lagstiftning.

Tillverkad enligt standarden  
KN95, EN149:2001+A1:2009, ISO 13485:2016

MAX Munskydd FFP2 utan ventil	
Användning	Vård
Färg	Vit
Antal/fp	10 st/fp, 70 fp/krt
Information	KN95, EN149:2001+A1:2009, ISO 13485:2016 Typ: FFP2 <b>Art.nr. 27408</b>

### Så här använder du munskydd på rätt sätt:

- Tvätta alltid händerna innan och efter du tar i munskyddet
- Använd snörena när du sätter på och tar av det
- Täck både näsan, munnen och hakan med skyddet
- Kläm åt näsbygeln
- Pressa skyddet mot näsan och placera skyddets nedre kant under hakan och se till att det inte finns några glipor.
- Rör inte munskyddet när du har det på
- Ta inte av det när du exempelvis ska prata
- Återanvänd inte masken, släng den efter användning

