



## DES +72

# Overflatedesinfeksjon med tensid

### Bruksområde

DES +72 er et flytende etanolbasert overflatedesinfeksjonsmiddel. Alkoholinnholdet er ca. 75 vol. %. Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre mikrobiologisk smittespredning (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetting av tensider øker alkoholens kontakt med overflaten.

pH 6-9.

Produktet er egnet for overflater forurenset med kroppsvæsker, f.eks. blod, - dvs. skitne overflater

### Produktfakta

Produktet er effektivt mot bakterier, sopp og visse typer virus.

EN 13624 Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae  
Escherichia coli  
Candida albicans

EN 16615 Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae

Candida albicans

EN 1276 Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae  
Escherichia coli

EN 1650 Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

I tillegg testes produktet og oppfyller effekt mot flere virus med og uten membrankappe i henhold til EN 14476:

EN 14476 Murin noro skitne betingelser  
BVDV (surrogat for hepatitt C) rene betingelser  
Vaccinia rene betingelser

Art.nr. 17230001 Antall per kartong: 12\* 1 l I flaske med vippekork1 l flaske med vippekork1 l flaske med vippekork

Art.nr. 17239300 Antall per kartong: 24\* 300 ml 300 ml flaske med vippekork

Art.nr. 17230005 Antall per kartong: 2 \* 5 l 5 l dunk med skrukork

### **Bruksanvisning**

Ved kraftig tilsmussing må overflaten som skal desinfiseres, først tørkes med en klut og vaskemiddel. Spray rikelig med desinfeksjonsmiddel på overflaten som skal desinfiseres, stryk omhyggelig ut og behandle deretter overflaten med en ren klut eller lofritt papir. Hvis overflaten er mindre, kan desinfeksjonsmiddelet påføres kluten. Det er viktig at overflaten er fuktig gjennom hele virkningstiden, minst 1 min., generell virketid 1-5 minutter. Overflaten skal lufttørke. Bruk vernehansker for å hindre uttørking av huden.

### **Håndtering av produkt og emballasje**

Oppbevaringstemperaturen skal være mellom -20 og 30 grader.

Tom og skyllet emballasje skal sorteres som "plastemballasje".

## Innhold

Denat. alkohol, vann, isopropylalkohol, tensid

## Oppbevaring og holdbarhet

3 års holdbarhet i uåpnet emballasje. 12 måneder etter åpning.

